

## Guide d'utilisation

### 1. Introduction de la carpule



Introduire la carpule dans le support et perforer la membrane.

### 2. Pièce à mains



1. Placer le capuchon dans le nid pourvu à cet effet  
2. Insérer le support sur l'appareil puis tourner 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La purge est automatique et 0.2ml d'anesthésique est libérée.

### 3. STA



1. Appuyer sur le bouton STA  
2. Anesthésie intra-ligamentaire lorsque les témoins de pression sont verts et quand l'appareil émet PDL.

### 4. Vitesse d'injection

Normal ControlFlo  
(gouttes à gouttes)

Appuyer sur la pédale à moitié  
Tonalité lente et profonde

Normal RapidFlo  
(continu)

Appuyer sur la pédale à fond  
Tonalité rapide et aigue

Turbo

Ne pas utiliser!


### 5. Aspiration



Le témoin lumineux vert doit être allumé.

L'aspiration s'active automatiquement après 2 secondes lorsque vous retirez le pied de la pédale

### 6. Activer le régulateur

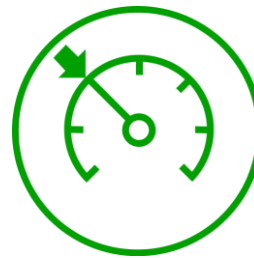

Le régulateur de vitesse s'active après 3 secondes en mode ControlFlo.  
Vous entendez „cruise“ et vous pouvez retirer le pied de la pédale.

### 7. Désactiver le régulateur



Appuyer sur la pédale pour désactiver le régulateur.  
L'appareil aspire lorsque le mode est activé.

### 8. Changer la carpule



En dévissant le support de l'appareil, le piston descend automatiquement.  
Vous pouvez alors introduire une nouvelle carpule et appuyer sur hold to train.

### 9. Tips & Tricks



Pour préserver vos ongles, métal sur métal ou utiliser une précelle.  
L'appareil est prêt à l'emploi lorsque les témoins lumineux verts s'allument.

### 10. Entretien



Après 25 anesthésies, l'appareil émet „lubricate o-ring and plunger“.  
Eteindre l'appareil puis rallumer en appuyant simultanément sur „Hold to Retract“. Le piston monte et graisser le joint avec du silicone. Rappuyer sur hold to retract et le piston redescend.