

Kurzanleitung

1. Einsetzen der Karpule und Entlüften:



Membran muss mit dem Dorn durchstoßen werden.
Ruckartige Bewegung.




1) Deckel des Handstückes in der Fassung lassen.
Re-Capping nur mit einer Hand.
2) Karpullenhalter im Gegenuhrzeigersinn um 90° drehen.



3) Mit dem eindrehen des Karpullenhalters fährt der Bolzen automatisch nach oben und das Handstück wird entlüftet.
0.2ml spritzen raus.

2. Intraligamentäre Anästhesie

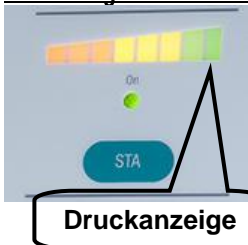

1-mal auf «STA»-Knopf drücken.

Die Druckanzeige hilft die Nadel richtig zu platzieren und den Druck auszugleichen bis Sie im grünen Bereich sind & PDL hören.

3. Injektionsgeschwindigkeiten im Normal-Mode

ControlFlo
(Tröpfchenmodus)

Fusspedal bis zur Hälfte drücken.
tiefer langsamer Ton

RapidFlo
(Schnellmodus)

Fusspedal ganz durchdrücken.
hoher schneller Ton

Aspirationsmodus

Zur Aktivierung des Aspirations-Modus muss das Gerät zuerst 2 Sekunden im Tröpfchenmodus arbeiten.
Durch Loslassen des Fusspedals aktivieren Sie den Aspirations-Modus.

4. Tempomat aktivieren



Bleiben Sie während 3 Sekunden auf dem ControlFlo (Tröpfchenmodus), so meldet the Wand STA „cruise“. Der Tempomat ist nun aktiviert. Sie dürfen das Fusspedal loslassen.

5. Tempomat deaktivieren




Fusspedal kurz ganz durchdrücken und wieder loslassen.
Das Gerät aspiriert, wenn es im Aspirationsmodus ist.

6. Wechseln der Karpulen



Mit dem Herausdrehen des Karpullenhalters fährt der Bolzen automatisch nach unten.
Mengenlämpchen leuchten nicht mehr.

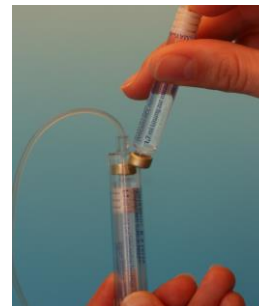

„Nagelschon-Trick“
Metall auf Metall:

Nach dem Wechseln der Karpule «Hold to Train»-Knopf drücken und Karpullenhalter eindrehen. *Alle Mengenlämpchen leuchten auf.*

7. Wartung



Nach 25 Anästhesien meldet the Wand „lubricate o-ring and plunger“.

Gerät mit on/off abstellen. Gleichzeitig „Hold to Retract“ gedrückt halten und Gerät mit on/off einschalten.
Bolzen fährt nach oben.
Mit Silikon einschmieren.
Erneut den „Hold to Retract“ drücken
Bolzen fährt nach unten.